# ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

# Диодный лазер Fox 1064 нм

лазер с длиной волны 1064 нм и мощностью 10 Вт для лечения грибковых заболеваний ногтей



Лазер Fox 1064 нм – диодный лазер с длиной волны 1064 нм и мощностью 10 Вт для лечения грибковых заболеваний ногтей (онихомикоз).

#### Лазер Fox 1064 нм. Показания к использованию

Клинические исследования подтверждают эффективность лечения лазером при всех грибковых заболеваниях ногтей:

- Дерматофиты рода Microsporum, Trichophyton и Epidermophyton
- Дрожжевые грибы рода Candida albicans
- Плесневые грибы
- Грибы рода трихофинов (Trichophyton rubrum).

### Лазер Fox 1064 нм. Как это работает.

Длина волны 1064 нм близка к спектру инфракрасного диапазона и идеально подходит для лечения охиномикоза. Лазерное излучение проникает через ногтевую пластину, паронихий и эпонихий к инфицированному ногтевому ложу. Энергия лазера поглощается только ногтевым ложем, не затрагивая окружающие ткани. Температура повышается, вызывая разрушение клеточной стенки и гибель патогенов.

### Лазер Fox 1064 нм. Нет пика мощности - нет боли.

В основе успеха в лечении грибковой инфекции лежит прогрев тканей ногтевого ложа до 45 градусов по Цельсию на протяжении 40 секунд. Процедура не требует анестезии, пациент ощущает лишь тепло в зоне воздействия. Регулировка мощности и равномерное движение по ногтевой пластине сводят к нулю появление какого-либо болезненного синдрома.

Отсутствие побочных эффектов после процедуры лазером Fox 1064 нм гарантируется отсутствием пиковых скачков высокой мощности. Энергия доставляется в ногтевое ложе ровным потоком в запланированном количестве.

[1] URL: http://medexim.ua 27 жовтня 2025 року

# ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

## Лазер Fox 1064 нм. Лечение без усилий

Один сеанс лечения лазером Fox 1064 нм занимает от 1 до 3 минут, в зависимости от размера ногтя. Обработка всех ногтей занимает 15-20 минут. Курс лечения напрямую зависит от тяжести заболевания, в большинстве случаев хватает 3 процедуры на протяжении 6-8 недель.

**Каков результат?** Клинические исследования показывают, что улучшение наблюдается у 80% пациентов после 3 процедуры. Однако, результат и эффективность лечения, а также минимизация риска рецидива напрямую зависят от соблюдения правил гигиены и мер предосторожностей (дезинфекция обуви, стирка носков при 60 градусов по Цельсию прочее).

**Есть ли противопоказания?** Лечение охиномикоза лазером не имеет противопоказаний и каких-либо побочных эффектов. Лечение не рекомендуется проводить при обширных воспалительных процессах, дерматофитии стопы в зоне обработки, нейропатии стоп.

#### Лазер Fox 1064 нм - здоровые ногти без медикаментов.

• Тип лазера: диодный

• Дисплей: сенсорный экран управления

• **Длина волны**: 1064 нм

• **Мощность:** 10 Вт

• Длительность импульса: 100 мкс - 45 с/режим постоянного излучения

• Прицельный луч: зеленый луч с длиной волны 532 нм

• **Габариты:** 142 x 163 x 174 мл

• Bec: 1.2 кг

[2] URL: http://medexim.ua 27 жовтня 2025 року