



Youlaser MT

Углекислотно/галій-арсенідовий лазер 10600 и 1540 нм с Mixed Technology



Лазерна система Youlaser MT – углекислотно/галій-арсенідовий лазер 10600 и 1540 нм с можливістю послідовального или одночасного використання двох волн (Mixed Technology). Одночасне використання двох волн збільшує переваги кожного випромінювання, мінімізує побічні ефекти и скорочує тривалість сеансу.

Клінічні дослідження показують, що використання сумішної (гібридної) технології показує чудові результати в омолодженні ув'ялої шкіри з морщинами и пігментацією, а також в ліченні атрофічних змін в слизовій (лазерна гінекологія).

Фракціонний абляційний лазер или неабляційний лазер? Проблема вирішена!

Спеціалісти по естетичній медицині и лікарі-косметологи знають про переваги и недоліки цих двох типів лазерів для омолодження. Абляційні лазери показують більш швидкі результати, но їх нельзя використовувати для всіх груп пацієнтів из-за тривалого періоду реабілітації и великого ризику порушень пігментації.

Процедури на неабляційному лазері носять більш щадячий характер для всіх типів шкіри, но для досягнення бажаного результату необхідні повторні курси лічення.


Тепер немає проблеми вибору між фракціонними абляційними и неабляційними лазерами! Тепер єсть Youlaser MT!

Лазерна система Youlaser MT – це перший и єдиний лазер, який руйнує обмеження омолодження завдяки об'єднаному впливу абляційного углекислого (карбонowego) и неабляційного галій-арсенідового лазера.

Інноваційний гібридний режим дозволяє підібрати схему лічення кожному пацієнту.

Youlaser MT. Омолодження и не тільки...

Лазер Youlaser MT дозволяє обробляти однією з двох волн или однією з трьох гібридних режимів для досягнення оптимального результату при процедурах омолодження.

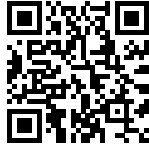


Прибор можно использовать в проведении малоинвазивных операций. Возможность работать на частоте 2000 Гц в микросекундном импульсном режиме - это быстрый и чистый разрез без кровотечения. При необходимости аппарат может комплектоваться различными хирургическим насадками.

MT - Mixed Technology. Механизм действия и результат.

Режимы воздействия на Youlaser MT дают возможность подавать лазерный луч длиной 1540 и 10600 нм в одной микроточке последовательно или одновременно. Это позволяет достигать баланса по глубине абляции и коагуляции для безопасного и эффективного воздействия.

Также в этой лазерной системе доступна функция OptiSim, моделирование результатов абляции и коагуляции на запланированном участке до начала процедуры. Что делает процедуру более предсказуемой и без побочных эффектов.

Действенность процедур Youlaser MT подтверждается гистологическими результатами. При исследовании образцов режим фракционной абляции с микроточками коагуляции по смешанной технологии показывает полное восстановление кожи через три дня!

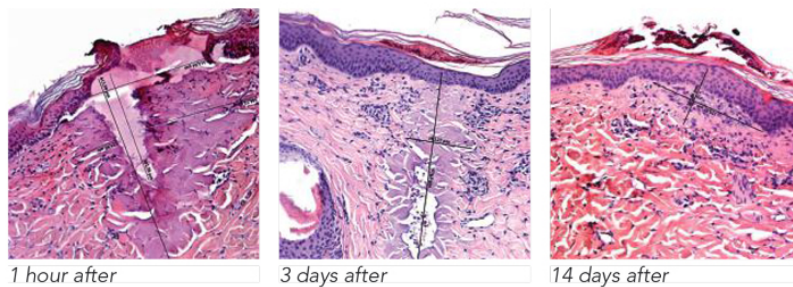

Гибридный или смешанный режим воздействия показывает ощутимый результат при лечении рубцов акне и морщин уже после первого сеанса, создавая абляционный эффект без реабилитационного периода.


Эффективность хирургического вмешательства на коже также возрастает, благодаря более точной и быстрой абляции и коагуляции.

Насадка Shelase - новое слово в лазерной гинекологии.

Атрофия слизистой влагалища - это уменьшение толщины природного коллагена, изменение формы и структуры слизистой влагалища, которое возникает в результате возрастных изменений, а также после родов. Такая трансформация ведет к ухудшению качества сексуальной жизни, возникновению мочевого синдрома менопаузы и синдрома недержания мочи.

Насадка Shelase и смешанная технология лазеров GaAs 1540 нм и CO₂ 10600 нм обрабатывает слизистую, одновременно вызывая неаблятивный и аблятивный эффекты. Лазерное излучение стимулирует сокращение слизистой оболочки и образование нового коллагена, восстанавливая нормальную эластичность влагалища.

В отличие от других подобных процедур, при лечении Shelase происходит минимальная контролируемая абляция. При этом волна неаблятивного лазера проникает вглубь ткани, усиливая терапевтический эффект. Благодаря смешанной технологии, точечные кровотечения практически отсутствуют, и нет необходимости в реабилитации.

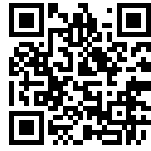

ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Адреса: вул. Назарівська, 1, Київ, 01032, Україна

Тел.: +38 (044) 234-4828, (044) 234-3628, (044) 467-5223

Сервісний центр: +38 (044) 500-1912

E-mail: manager@medexim.ua сайт: medexim.ua

МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕКСПЕРТНОГО РІВНЯ

Youlaser MT - новый стандарт в технологии лазерного омоложения.