



Автоклав TANDA Steri

горизонтальный стерилизатор класса B на 18/23 литров.



Автоклав TANDA Steri – горизонтальный стерилизатор класса B на 18/23 литров. Автоклав предназначен для стерилизации все типов медицинских, стоматологических, косметологических инструментов в упаковке и без нее, текстильных изделий.

Адаптивность.

Режимы стерилизации и конструкция аппарата позволяют максимально адаптировать прибор к потребностям вашей клиники. Исходя из потока пациентов можно выбрать стерилизатор с объемом 18 или 23 литра.

Четыре цикла стерилизации подходят для всего спектра медицинских и стоматологических инструментов, включая инструменты со сложной конструкцией.

Четыре цикла стерилизации подходят для всего спектра медицинских и стоматологических инструментов, включая инструменты со сложной конструкцией. Режим «Прион» специально разработан для полного уничтожения субмикроскопических инфекционных частиц и вирусов.

Конструкция внутренней камеры дает возможность максимально рационально и эффективно использовать рабочее пространство.

Эргономичность.

Автоклав имеет компактные габариты и легко размещается в стоматологических кабинетах, салонах красоты, где часто существует проблема площадей. Регулируемые опоры облегчают правильное позиционирование прибора.

Структура меню максимально упрощена. Цифровые и световые показатели отражают результаты тестирования, готовность к работе и последующие этапы стерилизации. Ручка открытия располагается в нижнем углу дверцы.

Доступ к резервуару с дистиллированной водой прост и удобен. Верхняя крышка легко открывается для наполнения и чистки. Наличие и объем воды отражается на передней панели автоклава.



Технологичність

Мощная вакуумная помпа и усовершенствованный цикл сушки обеспечивают остаточную влажность на уровне менее 2%, а современный генератор пара начинает работу сразу после окончания загрузки, уменьшая время стерилизации без потери качества.

Контроль и отслеживание основных параметров стерилизации производятся встроенным микропроцессором: температура, давление пара, время цикла, процессы охлаждения и сушки, пред- и пост-вакуум

Контроль.

Автоклав TANDA Steri выпускается в двух конфигурациях: со встроенным принтером и без него. Независимо от модели интерфейс автоклава предусматривает возможность подключения внешнего принтера через порт RS 232.

Наличие принтера дает возможность осуществлять полный контроль и документировать полный процесс стерилизации: показатели температуры, время цикла, данные о выключении и ошибках.

Набор тестирующих программ подтверждает готовность аппарата к работе и соответствие к заявленным параметрам автоклавирования.

Режимы стерилизации класса В

| Программа | Температура | Давление | Пред-вакуум | Время стерилизации | Время сушки |
|--|-------------------------|----------|-------------|--------------------|-------------|
| Стерилизация цельных инструментов без упаковки | 134 градусов по Цельсию | 210 кПа | 1 | 4 мин | 9 мин |
| Стерилизация цельных инструментов в упаковке | 134 градусов по Цельсию | 210 кПа | 3 | 5 мин | 9 мин |
| Стерилизация пористых инструментов | 121 градусов по Цельсию | 110 кПа | 3 | 20 мин | 18 мин |
| Режим «Прион» | 134 градусов по Цельсию | 210 кПа | 3 | 18 мин | 9 мин |

Тесты стерилизации

Для контроля и гарантии правильности проведения процесса стерилизации в автоклаве предусмотрено использование контрольных тестов

- Тест Helix. Рекомендуется производить ежедневно. Тест предназначен для оценки плотности и проникающей способности водяного пара в полые объекты;
- Тест B&D. Рекомендуется проводить ежемесячно. Тест используется для контроля проникающей способности пара при работе с пористыми объектами;
- Вакуумный тест. Ежедневное тестирование проводится для контроля давления и состоянием гидравлической системы.

Автоклав TANDA Steri - все, что нужно для качественной и быстрой стерилизации.