# ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

# Автоклав TANDA Steri

горизонтальный стерилизатор класса В на 18/23 литров.



Автоклав TANDA Steri - горизонтальный стерилизатор класса В на 18/23 литров. Автоклав предназначен для стерилизации все типов медицинских, стоматологических, косметологических инструментов в упаковке и без нее, текстильных изделий.

## Адаптивность.

Режимы стерилизации и конструкция аппарата позволяют максимально адаптировать прибор к потребностям вашей клиники. Исходя из потока пациентов можно выбрать стерилизатор с объемом 18 или 23 литра.

Четыре цикла стерилизации подходят для всего спектра медицинских и стоматологических инструментов, включая инструменты со сложной конструкцией.

Четыре цикла стерилизации подходят для всего спектра медицинских и стоматологических инструментов, включая инструменты со сложной конструкцией. Режим «Прион» специально разработан для полного уничтожения субмикроскопических инфекционных частиц и вирусов.

Конструкция внутренней камеры дает возможность максимально рационально и эффективно использовать рабочее пространство.

### Эргономичность.

Автоклав имеет компактные габариты и легко размещается в стоматологических кабинетах, салонах красоты, где часто существует проблема площадей. Регулируемые опоры облегчают правильное позиционирование прибора.

Структура меню максимально упрощена. Цифровые и световые показатели отражают результаты тестирования, готовность к работе и последующие этапы стерилизации. Ручка открытия располагается в нижнем углу дверцы.

Доступ к резервуару с дистиллированной водой прост и удобен. Верхняя крышка легко открывается для наполнения и чистки. Наличие и объем воды отражается на передней панели автоклава.

## ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

Teл.: +380 (96) 360-35-35, +36 (044) 467-32-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

#### Технологичность

Мощная вакуумная помпа и усовершенствованный цикл сушки обеспечивают остаточную влажность на уровне менее 2%, а современный генератор пара начинает работу сразу после окончания загрузки, уменьшая время стерилизации без потери качества.

Контроль и отслеживание основных параметров стерилизации производятся встроенным микропроцессором: температура, давление пара, время цикла, процессы охлаждения и сушки, пред- и пост-вакуум

### Контроль.

Автоклав TANDA Steri выпускается в двух конфигурация: со встроенным принтероми без него. Независимо от модели интерфейс автоклава предусматривает возможность подключения внешнего принтера через порт RS 232.

Наличие принтера дает возможность осуществлять полный контроль и документировать полный процесс стерилизации: показатели температуры, время цикла, данные о выключении и ошибках.

Набор тестирующих программ подтверждает готовность аппарата к работе и соответствие к заявленным параметрам автоклавирования.

### Режимы стерилизации класса В

Программа	Температура	Давление	Пред-вакуум	Время стерилизации	Время сушки
Стерилизация	134 градусов по	210 кПа	1	4 мин	9 мин
цельных	Цельсию				
инструментов					
без упаковки					
Стерилизация	134 градусов по	210 кПа	3	5 мин	9 мин
цельных	Цельсию				
инструментов в					
упаковке					
Стерилизация	121 градусов по	110 кПа	3	20 мин	18 мин
пористых	Цельсию				
инструментов					
Режим «Прион»	134 градусов по Цельсию	210 кПа	3	18 мин	9 мин

## Тесты стерилизации

Для контроля и гарантии правильности проведения процесса стерилизации в автоклаве предусмотрено использование контрольных тестов

- Тест Helix. Рекомендуется производить ежедневно. Тест предназначен для оценки плотности и проникающей способности водяного пара в полые объекты;
- Тест B&D. Рекомендуется проводить ежемесячно. Тест используется для контроля проникающей способности пара при работе с пористыми объектами;
- Вакуумный тест. Ежедневное тестирование проводится для контроля давления и состоянием гидравлической системы.

Автоклав TANDA Steri - все, что нужно для качественной и быстрой стерилизации.

[2] URL: http://medexim.ua 17 листопада 2025 року