



## Инкубатор для новорожденных ОКМ 801

*инкубатор рассчитан на создание комфортных условий недоношенных и новорожденных детей.*



Инкубатор рассчитан на создание комфортных условий недоношенных и новорожденных детей. Прибор помогает адаптироваться к новым условиям, восстановить нарушенные обменные процессы и избежать интенсивных методов лечения.

### Особенности инкубатора для новорожденных ОКМ 801

- Сервоконтроль проводится по температуре кожи, концентрации кислорода, влажности и воздушному потоку.
- Датчик температуры окружающей среды оптимизирует работу радиатора.
- Инновационный метод контроля PID обеспечивает стабильность температурного режима.
- Контрольные датчики температуры и влажности расположены во всех критических точках системы.
- Система воздушного контура разработана с учетом основных правил аэродинамики и многих экспериментов.
- Теплый занавес обеспечивает сохранение микроклимата при открытии окон и стенок инкубатора.
- Бесшумная работа инкубатора благодаря использованию современных помп.
- Многоуровневая система тревоги.
- 8-дюймовый сенсорный экран управления с отображением основных параметров и сигналов тревоги.
- Автономный источник питания с поддержкой рабочего состояния кюветы до 30 минут.
- Наружный доступ с обеих сторон инкубатора.
- Удобная конструкция штатива: регулировка положения по высоте, 2 выдвижных ящика, ручка для перемещения инкубатора, 4-колесная система со стопорами.

### Температурный контроль.

Система датчиков обеспечивает более стабильный температурный режим. Уровень обогрева изменяется на основе разницы между температурой окружающей среды и установленной температурой воздуха в боксе

Специальный алгоритм PID поддерживает оптимальный температурный режим постоянно регистрируя,



## ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.

Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

вычисляя и корректируя разницу между заданной температурой и температурой воздуха в боксе.

Неоднородность температуры минимизируется инновационным воздушным контуром. Продуманная аэродинамическая система создает максимально оптимальную и безопасную среду для младенца.

### **Надежность.**

Неонатальный инкубатор снабжен многоуровневой системой тревоги. Температурные датчики расположены в разных точках нагревательного модуля. Тревожные сигналы срабатывают при сбое в работе воздушного контура, неработающих нагревательных элементов и термоэлектрических преобразователей.

Инкубатор ОКМ 801 дополнительно оснащается аккумулятором, поддерживающим бесперебойную работу прибора в течение 30 минут. Бесшумная работа инкубатора положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой и дыхательной системы новорожденного, модель сна и уровень стресса.

**Инкубатор ОКМ 801 - безопасные комфортные условия для недоношенных и новорожденных детей.**