



## ROTEM delta

Сучасний 4-х каналний тромбоеластометр з блоком (опція) для агрегації тромбоцитів.



Тромбоеластометр ROTEM delta - сучасний 4-х каналний тромбоеластометр з блоком (опція) для агрегації тромбоцитів.

Швидка диференціальна діагностика є життєво важливою. Вона також є основою цілеспрямованої терапії. Тестування за допомогою ROTEM delta та портфеля рідких реагентів забезпечує швидку діагностику коагулопатій для оптимізації рішень щодо переливання крові при операціях та сценаріях травматичної кровотечі. Огляд стану коагуляції протягом 10 хвилин допомагає миттєво визначити коагулопатію, що лежить в основі, і прийняти відповідні рішення для індивідуальної та цілеспрямованої терапії.

З системами ROTEM скорочуються обсяги переливання крові, повторні операції, показники інфікування, витрати, пов'язані з тривалістю перебування в лікарні та смертність пацієнтів.

### **Комплексний портфель реагентів забезпечує диференціальну діагностику та дозволяє отримати результат вже через 10 хвилин.**

- ex-tem 10 x 1 мл - реагент для дослідження активації за зовнішнім шляхом
- in-tem 10 x 1 мл - реагент для дослідження активації за внутрішнім шляхом
- ar-tem 10 x 1 мл - реагент для детекції гіперфібринолізу та оцінки ефективності антифібринолітичної терапії.
- fib-tem 10 x 1 мл - реагент для дослідження фібриногену з блокуванням тромбоцитів, детекція порушень полімеризації фібрину. Вплив FXIII.
- hep-tem 10 x 1+1 x 1 мл - детекція гепарину (та аналогічних антикоагулянтів), детекція порушень гемостазу на фоні антикоагулянтної терапії

### **Параметри, що вимірюються**

- **CT** (час коагуляції) - загальна активність коагуляційної системи
- **CFT** (час утворення згустку) та альфа-кут (початкова швидкість утворення згустку) - оцінка функції тромбоцитів, дії фактора XIII, полімеризації фібрину, активності гепарину
- **MCF** - якість згустку, оцінка його механічних властивостей
- **ML** - оцінка фібринолітичної активності



## ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.

Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: [info@medexim.ua](mailto:info@medexim.ua) сайт: [medexim.ua](http://medexim.ua)

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

